


Veiligheidsstang "Pole" Montagehandleiding:

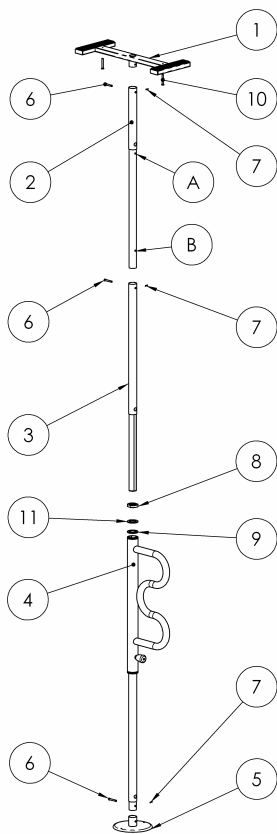


AFBEELDING 1

AANWIJZING: De veiligheidsstang is ontworpen voor plafondhoogtes van 210 tot 300 cm.


Bepaal waar u dit product wilt gebruiken en meet de plafondhoogte, voordat u met de montage begint.

1. Neem alle onderdelen uit de verpakking en leg u ze op een vlakke ondergrond, zoals op afbeelding 1 weergegeven.
2. Gebruik de verlengingsbuis (POSITIE 2) **niet** als uw plafond 210 cm hoog is. Bevestigt u het bovenste frame (POSITIE 1) direct aan POSITIE 3, doordat u de gaten in POSITIE 1 en POSITIE 3 op elkaar afstemt en de bout (POSITIE 6) door het boorgat steekt. Nadat u de bout hebt gemonteerd, steekt u de splitpen (POSITIE 7) door het gat in de bout en buigt het uiteinde van de splitpen om, zodat de bout als op afbeelding 2 weergegeven is geborgd.
3. Als uw plafond een hoogte van 240 tot 300 cm heeft, bevestigt u het bovenste frame (POSITIE 1) op de verlengingsbuis (POSITIE 2), doordat u de gaten in de buis afstemt en de bout en de splitpen zo monteert, als in stap 2 toegelicht en op afbeelding 2 weergegeven.
4. Zoals op afbeelding 1 weergegeven beschikt de verlengingsbuis (POSITIE 2) over 2 gaten, die met "A" resp. "B" zijn aangeduid. Het gat "A" is bedoeld voor een plafondhoogte van 240 cm. Het gat "B" voor een plafondhoogte van 270 tot 300 cm.

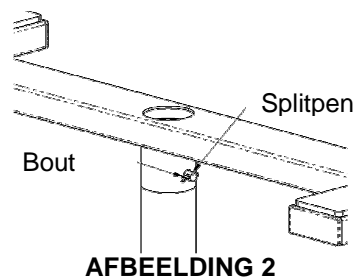

AFBEELDING 2

5. Bevestig de verlengingsbuis (POSITIE 2) aan (POSITIE 3), doordat u de met "A" of "B" gemarkeerde gaten van (POSITIE 2) voor de betreffende plafondhoogte op de betreffende gaten in de bovenste buis (POSITIE 3) afstemt en de bout en de splitpen monteert zoals in stap 2 toegelicht.
6. Bevestig POSITIE 5 (standvoet) aan POSITIE 4 (hoofdstang & gebogen greepstang), zoals op afbeelding 1 weergegeven, doordat u de gaten in POSITIE 4 en POSITIE 5 op elkaar afstelt en de bout en de splitpen monteert zoals in stap 2 toegelicht en op afbeelding 3 weergegeven.

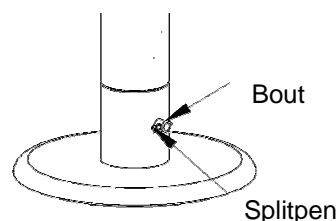

AFBEELDING 3

7. Steek het draaddeel van POSITIE 3 in POSITIE 4 en plaats de veiligheidsstang op de gewenste plek, met POSITIE 5 op de vloer en POSITIE 1 aan het plafond


AANWIJZING: Voor u POSITIE 3 in POSITIE 4 steekt, moet u ervoor zorgen dat de kunststoffen afstandsring (POSITIE 11) is aangebracht tussen de stelmoer (POSITIE 8) en de *onderlegplaatje* (POSITIE 9); zoals op afbeelding 1 weergegeven.

8. Om de veiligheidsstang tussen vloer en plafond veilig te bevestigen, draait u de stelmoer (POSITIE 8) door middel van van de bijgeleverde sleutel (niet afgebeeld) met de klok mee. Draai de onderste stelmoer vast, tot de veiligheidsstang tussen vloer en plafond is bevestigd.

AANWIJZINGEN:

Als de veiligheidsstang niet veilig tussen vloer en plafond kan worden bevestigd, draait u de stelmoer (POSITIE 8) los en zorgt u ervoor dat de veiligheidsstang precies loodrecht tussen vloer en plafond is gemonteerd. Draai dan de stelmoer (POSITIE 8) weer aan, zoals in stap 8 toegelicht. Als er extra bevestigingen nodig zijn, kunt u twee houtschroeven (POSITIE 10) in de plafondsteun schroeven, zoals op afbeelding 4 te zien is. Daarnaast kunt u ook de standvoet (POSITIE 5) met twee extra schroeven aan de vloer vastmaken.

Een kleine speling van de draagriep is normaal en vormt geen gevaar voor de veiligheid. Dankzij deze speling kan de vergrendelingspen probleemloos in de 8 beschikbare gebruiksvriendelijke posities vastklikken. Trek aan de pen en draai de gebogen greepstang. Laat de pen los en draai de greepstang zo lang verder, tot de pen, die een veermechanisme heeft, vastklikt en de handgreep daardoor in de gewenste positie borgt.

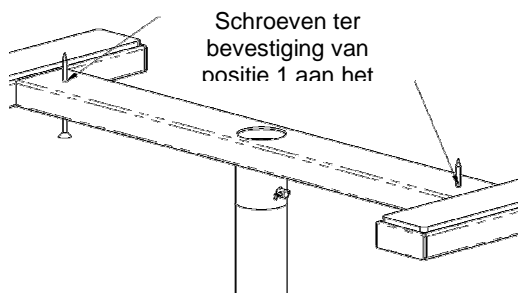

AFBEELDING 4

6. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Standers Inc. en de fabrikant/dealer zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel die uit het onjuiste gebruik of de montage van het product kunnen voortvloeien of zijn voortgevloeid.

Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsaanwijzingen grondig door, voordat u het product gebruikt.

LET OP: Lees de volgende aanwijzingen grondig door, voordat u het product gebruikt

1. VOORZORGSMAATREGELEN:

- ✓ Controleer regelmatig id de veiligheidsstang goed vastzit tussen vloer en plafond.
 - ✓ Zorg ervoor dat de veiligheidsstang onder een hoek van exakt 90 graden tot de vloer is geïnstalleerd. Alle rubberlagen moeten contact met de vloer resp. met het plafond hebben.
 - ✓ Voor personen die behoren tot bepaalde risicogroepen moeten extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Hiertoe behoren mensen met een verstandelijke handicap (inclusief mensen die onder invloed van geneesmiddelen zijn), zeer grote personen of personen met een sterk overgewicht, en iedere situatie, waarin het vermogen van een persoon voor het gebruik van de veiligheidsstang zonder hulp verminderd is.
 - ✓ De handgreep op de veiligheidsstang is voorzien van een pen met veermechanisme. Hierdoor kan de handgreep gedraaid en in verschillende posities worden vastgezet. Overtuig u er voor het gebruik van het product van dat de draaigreep in een veilige positie is vastgeklikt. Indien de handgreep niet is vastgeklikt, kan dit leiden tot vallen van de gebruiker en daarmee tot ernstig letsel of schade.
2. Als u lijdt aan een ziekte, letsel hebt, of medicijnen gebruikt, die uw evenwichtsgevoel of uw vermogen om te staan of te zitten nadelig beïnvloeden, neem dan eerst contact op met uw dokter, voordat u dit product gebruikt. Een onjuist gebruik van dit product kan ernstig letsel of schade met zich meebrengen.
3. Het product is niet bedoeld om het volle gewicht van een persoon te dragen. Dit product dient alleen als evenwichtshulpmiddel en steun bij zitten en staan.
4. De bij het product behorende aanwijzingen moeten zorgvuldig worden opgevolgd, om te garanderen dat het product correct geïnstalleerd en gemonteerd is. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot ernstig letsel van de gebruiker(s) van het product.
5. Let erop dat kinderen niet met het product spelen of eraan gaan hangen.