

AANWIJZING VOOR GEBRUIKERS

Dit product dient alleen als evenwichtshulpmiddel en steun. Het is niet bedoeld om het volle gewicht van een persoon te dragen. LEES voor het gebruik van dit product de waarschuwingen grondig door.

LET OP: Lees de volgende aanwijzingen grondig door, voordat u het product gebruikt


1. Als u lijdt aan een ziekte, letsel hebt, of medicijnen gebruikt, die uw evenwichtsgevoel of uw vermogen om te staan of te zitten nadelig beïnvloeden, neem dan eerst contact op met uw dokter, voordat u dit product gebruikt. Een onjuist gebruik van dit product kan ernstig letsel of schade met zich meebrengen.
2. Het product is niet bedoeld om het volle gewicht van een persoon te dragen. Dit product dient alleen als evenwichtshulpmiddel en steun bij zitten en staan.
3. De bij het product behorende aanwijzingen moeten zorgvuldig worden opgevolgd, om te garanderen dat het product correct geïnstalleerd en gemonteerd is. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot ernstig letsel van de gebruiker(s) van het product.
4. Let erop dat kinderen niet met het product spelen of eraan gaan hangen.
5. Voor de bedsteun is het belangrijk dat het matras zwaar genoeg is om het product te houden. De bedsteun is ongeschikt voor lichte schuimstofmatrassen of andere lichte matrassen en mag daarom met dergelijke matrassen niet worden gebruikt. **UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID:** Standers Inc. en de fabrikant/dealer zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel die uit het onjuiste gebruik of de montage van het product kunnen voortvloeien of zijn voortgevloeid.

Bedsteun "BedCane"

MONTAGEHANDLEIDING

AANWIJZING:

De slotbout wordt aan de zijkant met de rechthoekige opening door de houder gestoken

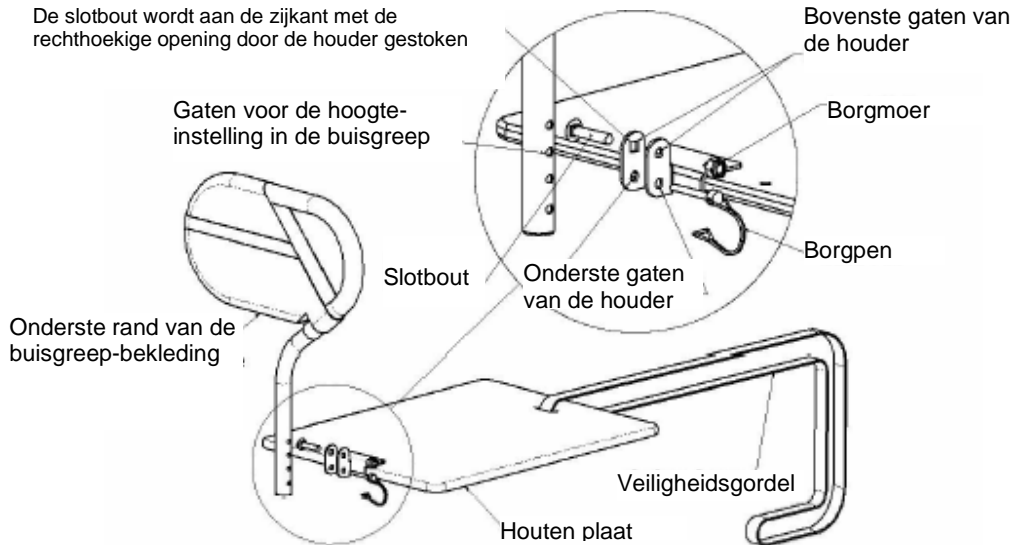

1. Om voor matrassen met een verschillende dikte te kunnen worden gebruikt, is de buisgreep van de bedsteun in hoogte verstelbaar uitgevoerd. Let er bij de bovenstaande afbeelding op dat de **buisgreep voorzien is van gaten voor de hoogte-instelling**.
2. Voor een correcte montage van de bedsteun dient de **onderste rand van de buisgreep-bekleding** onder de bovenkant van de matras worden geplaatst.
3. Plaats de buisgreep *tussen* de uitstekende lussen van de **houder**, die aan de **houten plaat** is bevestigd. Stem de gaten voor hoogte-instelling in de **buisgreep** af op de **bovenste en onderste gaten in de houder**.
4. Steek de **slotbout** aan de zijkant met de rechthoekige opening door de **bovenste gaten in de houder** en de hierop afgestemde **gaten in de buisgreep**. Bevestig de **buisgreep** met behulp van de bijgeleverde gereedschappen aan de **houder**, doordat u de **borgmoer** vastdraait. Let erop dat u de moer zo vast vastdraait, dat de buisgreep van de bedsteun niet wiebelt.
5. Zorg ervoor dat de **buisgreep** haaks staat op de **houten plaat** en steek de **borgpen** door de **onderste gaten in de houder** en de hierop afgestemde **gaten in de buisgreep**. Nadat u de borgpen hebt gebruikt, draait u de draad van de borgstift naar het tegenovergestelde einde van de pen en legt de driehoekige draadlus om het uiteinde van de borgstift, om zo te voorkomen, dat deze uit de houder losgaat.
6. **BELANGRIJK:** De **houten plaat** MOET tussen matras en veerbodem van het bed worden geplaatst! De matras moet de gehele oppervlakte van de houten plaat bedekken.
7. Doe de veiligheidsgordel tussen matras en veerbodem van het bed door en om het metalen raam van het bed, zoals op de onderstaande afbeelding verduidelijkt. Stel de veiligheidsgordel zo in, dat de bedsteun veilig naast het matras bevestigd is en zich niet kan bewegen.

