


539L LICHTGEWICHT DOUCHESTOEL

Introductie

De Days Healthcare 539L douchestoel is een lichtgewicht, in hoogte verstelbare douchestoel, gemaakt van een aluminium buizenframe en plastic zitting. De stoel is voorzien van ingebouwde zijgrepen voor meer stabiliteit en extra steun voor de gebruiker.

Instelling van de hoogte

Voor de instelling van de hoogte neemt u de snelsluiting (zie fig. 1) tussen duim en wijsvinger en trekt eraan. Schuif de poot verder naar binnen of buiten, tot de vereiste positie is bereikt. Duw de klem daarna stevig in het gat. Herhaal de handeling voor de andere poten en controleer of alle vier op dezelfde hoogte zijn ingesteld.

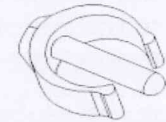

Snap lock (fig 1)

Instelling van de zitting

De plastic zitting wordt gewoon vastgeklemd en door het buizenframe in positie gehouden.

Reiniging

De Days Healthcare 539L douchestoel vereist slechts een minimaal onderhoud. Gewoon schoonvegen met een zachte, natte doek. Gebruik een huishoudelijk neutraal schoonmaakmiddel en warm water. De douchestoel kan na de reiniging onder stromend water onder lage druk of met de douche worden afgespoeld. Tevens kan de plastic zitting worden losgeklikt, om het schoonmaken te vergemakkelijken.

Gebruik geen harde schuurmiddelen of schoonmaakmiddelen op chloorbasis om verkleuring te vermijden. Bij desinfectering reinigen zoals hiervoor beschreven en daarna afvegen met een oplossing van 1.000 ppm chloorhoudend desinfecteermiddel (tabletten volgens voorschrift), afspoelen en drogen.

Onderhoud

Niet opslaan bij temperaturen onder 0°C. Controleer de stoel regelmatig op uitgesleten of klemmende stelgaten. Controleer de stoel ook op gescheurde rubber afdichtingen en snelsluitingen. Let op - niet gebruiken als de zitting beschadigd of gescheurd is.

Specificatie

Model	Breedte	Diepte	Zittingbreedte	Zittingdiepte	Zittinghoogte	Max. gewicht gebruiker
539L	550mm	380mm	370mm	280mm	460-590mm	160 Kg

Reserveonderdelen

Onderdeelnr	Beschrijving
539LPL001	Plastic Zitting

Garantie

Voor de Days Healthcare model nr. 539L geldt een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum op fabrieks- en materiaalfouten. Neem in geval van problemen contact op met uw leverancier/dealer. De garantie is beperkt tot de daadwerkelijke kosten voor het verhelpen van het probleem, en geldt niet voor vracht- en reiskosten, inkomstenderving, onkosten enz.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verwondingen als gevolg van misbruik of het veronachtzamen van de bovenstaande instructies.

Days Healthcare is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van een onjuist of onveilig gebruik van de douchestoel.

